

山东省临床检验中心

2025 年粪便隐血试验室间质量评价调查活动须知

2025 年山东省临床检验中心组织全省临床实验室开展粪便隐血试验室间质量评价调查活动，共 5 个批号，一次邮寄。有关内容说明如下：

一、测定时间及样品批号

次数	样品批号	数量	测定日期	截止日期	成绩反馈
第一次	255321~25	5 支	6 月 26 日	7 月 3 日	7 月 17 日

二、评价项目

检测项目：粪便隐血试验 1 项。

三、样品接收及处理

1、实验室收到室间质评样品后，请根据本实验室申请表中填写的参评项目认真检查核对样品种类、数量及编号，如有破损、缺失或编号错误，请于**6 月 23 日前**登录山东省临床检验中心网站，在【室间质评信息】栏目下，点击【样品接收状态确认及补寄申请】，按照相应流程申请补寄。**务必严格按照流程申请，扫描二维码在线申请，同时发送《补寄申请表》，否则可能导致无法补寄。**

2、样品为干粉，主要成分：人血红蛋白、蛋白保护剂。2~8℃密闭避光贮存稳定 24 个月；复溶后 2~8℃避光保存可稳定 48 小时。

将样品放置室温平衡，使其温度恢复至室温。小心打开瓶盖，避免内容物的损失。采用计量检定合格的移液器或刻度吸管准确吸取 4.0mL 生理盐水复溶。盖上橡胶塞，拧紧瓶盖，轻轻旋转并颠倒小瓶，确保内容物完全溶解。注意避免剧烈摇晃，避免产生气泡。

本质评品适用于手工检测和自动粪便分析仪器等检测方法。质评品干粉复溶后，使用过程中不得再次使用生理盐水或样本稀释液进行二次稀释，否则可能影响结果的判断。

3、将样品等同于临床样本进行检测。此样品虽经灭活处理，但仍应按有潜在生物传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

四、结果回报

1、使用 Web 方式传递室间质评信息。具体结果回报方法请查看《2025 年山东省医疗机构临床实验室室间质量评价计划》中“六、室间质量评价信息系统使用指南”。

2、测定结果：填写 1（阴性）或 2（阳性）。

3、报告结果时必须填写检测方法、试剂、仪器等信息，请在回报表相应位置的下拉菜单中选

择对应编码。检测方法均为胶体金法。试剂编码见附件 1。仪器编码见附件 2。

4、请务必在规定时间内上报检测结果。填写结果和编码时，请仔细审核后发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认。

5、参评实验室必须严肃认真对待每一次室间质量评价活动，不允许串通或伪造结果，一经发现，对参加者的能力评定为不合格。

五、联系方式

如果参加室间质评单位遇到与质评有关的问题，请与临检中心质评室联系。

地址：济南市历下区经十路 9677 号山东省立医院东院区诚和楼 505

电话：0531-87906016

邮箱：sdccleqa@163.com、sdccloffice@163.com

附件 1 试剂编码表

编码	试剂、校准物厂家名称	编码	试剂、校准物厂家名称
s530001	四川沃文特	s530016	博拓生物
s530002	爱威科技	s530017	中新科炬
s530003	长沙协大	s530018	蓝十字
s530004	科域生物	s530019	深圳惠安
s530005	重庆天海	s530020	威海纽普
s530006	海路生物	s530021	雅培生物
s530007	湖南丽拓	s530022	北京消康保
s530008	北京万华普曼	s530023	易宝泰生物
s530009	上海凯创	s530024	厦门为正
s530010	万孚生物	s530025	厦门波生
s530011	艾博生物	s530026	杭州安旭
s530012	英科新创	s530027	北京英诺特
s530013	山东康华	s530028	武汉康珠
s530014	济南继德	s530999	其他
s530015	济南兰洁		

附件 2 仪器编码表

编码	仪器厂家名称	编码	仪器厂家名称
530001	手工检测	530051	重庆天海 DBF J-1000
530011	四川沃文特 FA160	530052	重庆天海 DBF J-2000
530012	四川沃文特 FA170/S	530061	海路生物 F220
530013	四川沃文特 FA180/S	530062	海路生物 F240
530014	四川沃文特 FA280/S	530063	海路生物 F260
530021	爱威科技 561/A/B	530064	海路生物 F280
530022	爱威科技 562/A/B	530065	海路生物 F320
530023	爱威科技 563/A/B	530066	海路生物 F340
530031	长沙协大 F6001A/B	530067	海路生物 F360
530032	长沙协大 F6002A/B	530068	海路生物 F380
530033	长沙协大 F6003A/B	530081	济南兰洁 LJ-3000
530034	长沙协大 F6004A/B	530082	济南兰洁 LJ-5000
530035	长沙协大 F6005A/B	530091	艾博生物
530036	长沙协大 F6006A/B	530101	济南继德
530037	长沙协大 F6007A/B	530111	湖南丽拓 LTS-E300
530038	长沙协大 F6008A/B	530121	博拓生物
530041	科域生物 F10	530999	其他仪器
530042	科域生物 F20		
530043	科域生物 F40		