

# 山东省临床检验中心

## 2026年粪便隐血试验室间质量评价活动须知

2026年山东省临床检验中心组织全省临床实验室开展粪便隐血试验室间质量评价活动，全年进行两次评价活动，共发放10个质评样品，每次活动测定5个批号样品，全年一次邮寄。有关内容说明如下：

### 一、样品批号及时间安排

次数	样品批号	数量	测定日期	截止日期	反馈日期
第1次	265311~15	5支	4月8日	4月14日	4月30日
第2次	265321~25	5支	9月16日	9月22日	10月14日

### 二、评价项目

检测项目：粪便隐血试验1项。

### 三、样品接收及处理

1、实验室收到室间质评样品后，请根据本实验室申请表中填写的参评项目，认真检查核对室间质评样品种类、数量及编号，如有破损、缺失或编号错误，请于**4月1日**前登录山东省临床检验中心官网（<http://www.sdcl.com.cn/>），进入“**室间质评EQA**”系统，严格按照《能力验证物品（室间质评样品）补寄申请表》申请补寄（详见室间质评EQA系统“操作手册”中“能力验证物品（室间质评样品）补寄操作说明”）。**截止日期后的申请不予处理。**

2、样品为干粉，主要成分：人血红蛋白、蛋白保护剂。2~8℃密闭避光贮存稳定24个月；复溶后2~8℃避光保存可稳定48小时。

将样品放置室温平衡，使其温度恢复至室温。小心打开瓶盖，避免内容物的损失。采用计量检定合格的移液器或刻度吸管准确吸取4.0mL蒸馏水复溶。盖上橡胶塞，拧紧瓶盖，轻轻旋转并颠倒小瓶，确保内容物完全溶解。注意避免剧烈摇晃，避免产生气泡。

本质评品适用于手工检测和自动粪便分析仪器等检测方法。质评品干粉复溶后，使用过程中不得再次使用蒸馏水或样本稀释液进行二次稀释，否则可能影响结果的判断。

3、将样品等同于临床样本进行检测。此样品虽经灭活处理，但仍应按有潜在生物传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

### 四、结果回报

1、结果回报具体操作方法，请登录“**室间质评 EQA**”系统下载“操作手册”查阅，若遇到系统登录、数据上报相关问题，可致电 010-84533392 咨询。

2、填报说明：**检测体系（方法、仪器、试剂）为必选项**，否则无法上报数据；系统支持检测体系关键字搜索，如未找到您室使用检测体系请选择其他，并注明详细信息。**检测方法均为胶体金法。试剂品牌名称表见附件 1。仪器品牌及型号表见附件 2。**

3、测定结果：填写：“**阴性**”或“**阳性**”。

4、**请务必在规定时间内上报检测结果**。请仔细审核后点击“上报”，提示“上报成功”后请到“历史上报查询”中进行结果确认。**在截止日期内数据可重新上报。**

5、参评实验室必须严肃认真对待每一次室间质量评价活动，**不允许串通或伪造结果**，一经发现，对参加者的能力评定为不合格。

## 五、联系方式

如果参加室间质评单位遇到与质评有关的问题，请与临检中心质评室联系。

地址：济南市历下区经十路 9677 号山东省立医院东院区诚和楼 505 室

电话：0531-87906016

邮箱：[sdccleqa@163.com](mailto:sdccleqa@163.com)、[sdccloffice@163.com](mailto:sdccloffice@163.com)

山东省临床检验中心

2026 年 3 月 19 日

附件 1 粪便隐血试验试剂品牌名称表

	试剂、校准物品牌名称		试剂、校准物品牌名称
s530001	四川沃文特	s530016	博拓生物
s530002	爱威科技	s530017	中新科炬
s530003	长沙协大	s530018	蓝十字
s530004	科域生物	s530019	深圳惠安
s530005	重庆天海	s530020	威海纽普
s530006	海路生物	s530021	雅培生物
s530007	湖南丽拓	s530022	北京消康保
s530008	北京万华普曼	s530023	易宝泰生物
s530009	上海凯创	s530024	厦门为正
s530010	万孚生物	s530025	厦门波生
s530011	艾博生物	s530026	杭州安旭
s530012	英科新创	s530027	北京英诺特
s530013	山东康华	s530028	武汉康珠
s530014	济南继德	s530999	其他
s530015	济南兰洁		

附件 2 粪便隐血试验仪器品牌名称及型号表

	仪器品牌名称及型号		仪器品牌名称及型号
530001	手工检测	530051	重庆天海 DBF J-1000
530011	四川沃文特 FA160	530052	重庆天海 DBF J-2000
530012	四川沃文特 FA170/S	530061	海路生物 F220
530013	四川沃文特 FA180/S	530062	海路生物 F240
530014	四川沃文特 FA280/S	530063	海路生物 F260
530021	爱威科技 561/A/B	530064	海路生物 F280
530022	爱威科技 562/A/B	530065	海路生物 F320
530023	爱威科技 563/A/B	530066	海路生物 F340
530031	长沙协大 F6001A/B	530067	海路生物 F360
530032	长沙协大 F6002A/B	530068	海路生物 F380
530033	长沙协大 F6003A/B	530081	济南兰洁 LJ-3000
530034	长沙协大 F6004A/B	530082	济南兰洁 LJ-5000
530035	长沙协大 F6005A/B	530091	艾博生物
530036	长沙协大 F6006A/B	530101	济南继德
530037	长沙协大 F6007A/B	530111	湖南丽拓 LTS-E300
530038	长沙协大 F6008A/B	530121	博拓生物
530041	科域生物 F10	530999	其他仪器
530042	科域生物 F20		
530043	科域生物 F40		